



La montre multifonction

Les fonctions des boutons

La montre a trois boutons :

- 1 Le bouton **VIVAGO** sur la montre sert à déclencher les alarmes, sauf dans le mode paramétrage de la montre.
- 2 Le bouton **LIGHT** allume l'éclairage de l'écran. L'éclairage s'éteint automatiquement après 15 secondes.
- 3 Le bouton **MODE** pour naviguer à travers les différents menus.



En enfonçant en même temps les menus LIGHT et MODE vous entrez dans le mode d'installation, où vous pouvez paramétrer l'heure, la date et l'alarme de réveil. Voir les paramètres de la montre.



Les principales fonctions VIVAGO

Tant qu'il y a du mouvement, il y a de la Vie !

Le principe de Vivago est basé sur le mouvement qui est la traduction de l'activité physiologique, donc de l'activité cérébrale.

La montre est munie de trois capteurs :

- un capteur de mouvements et de micro-mouvements
- un capteur de température cutanée
- un capteur de mesure de notre résistance électrique naturelle (au niveau de la peau + ou - favorisée par la sudation)

En bref

- Apprendre le rythme quotidien de l'utilisateur pendant son étalonnage de 4 jours.
 - Envoyer une alarme manuelle en cas de besoin grâce au bouton situé au centre du bracelet VIVAGO.
 - Déclencher des alarmes automatiques en cas de besoin
 - Ouvrir automatiquement une connexion vocale mains libres en cas d'alarme
 - Contrôler si le bracelet est porté ou non
 - Tester automatiquement le matériel de manière périodique pour vérifier son bon fonctionnement.
- En cas de défaillance, des avertissements sont envoyés (ex : pile faible, panne secteur...).